

Produktinformation

melinip Schnabelbecher standard, Unterteil, 200 ml, farblos-natur

Artikel-Nr.: 01031100

Verpackungseinheit: VE = (10 Stück)

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

Füllstriche im Abstand von 25 ml - runde Becherform Ø 73 mm x Höhe 100 mm - hochwertiger und robuster Kunststoff - stapelbar - mikrowellene geeignet - spülmaschinengeeignet bis 93° C

Material

Polypropylen (PP)

Gewicht

Stück 0,03 kg

VE (10 Stück) 0,30 kg

Barcodes GTIN / EAN

VE 4251125700009

Abmessungen L x B x H

VE 230 x 144 x 72 mm

MDR (2017/745)

UDI-DI: 4251125700009

Basis UDI 42511257010311D9

Klasse nach MDR class 1

Anleitung / Einweisung nicht erforderlich

Hersteller Helmut Schwarz GmbH, Rengers 6, 88316 Isny, Germany

Zusatzinformationen

Zolltarifnummer: 39269097

Ursprungsland: -

Aufbereitung und Wiederverwendung

PP: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 140° C möglich. Achten Sie nach der Reinigung des Kunststoffartikels darauf, dass überschüssiges Wasser abfließen kann und dieser vollständig getrocknet ist, bevor Sie diesen verwenden. Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit nimmt die Trocknung etwas mehr Zeit in Anspruch.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukte so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.