



DAS VOLLE PROGRAMM
FÜR DIE FLÄCHE IN NUR



Incidin™ Pro

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL FÜR MEDIZINPRODUKTE UND OBERFLÄCHEN ALLER ART

Incidin™ Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

- ▲ Ihr Pro für Schnelligkeit
- ▲ Ihr Pro für Effektivität
- ▲ Ihr Pro für Verträglichkeit



ECOLAB®

www.ecolab.com

Incidin™ Pro

Flächendesinfektionsmittel, aldehydfrei und ohne Farb- und Duftstoffe



Das volle Programm in nur 60 Minuten – Getestet nach neusten EN-Normen:

- ▲ Wirksamkeit gemäß 4-Felder-Test nach 5 Minuten bei 1%
- ▲ Wirksamkeit gegenüber Norovirus nach 60 Minuten bei 1%
- ▲ Tuberkulozide Wirksamkeit nach 60 Minuten bei 1,5%
- ▲ Mykobakterizid Wirksamkeit nach 60 Minuten bei 1,5%

UNSERE LEISTUNG	IHR NUTZEN
Breites Wirkspektrum – nach den neuesten EN Standards getestet	Effektive Desinfektion und Reinigung
Kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen	Zeit- und Kostenersparnis
Exzellente Reinigungsleistung	Saubere Oberflächen mit hoher Materialkompatibilität

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION		EINWIRKZEIT Min.
	%	ml/L	
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)			
Flächendesinfektion gemäß VAH 2015, mit Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	0,5/1	5/10	30/15
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie			
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004*	0,25/0,5	2,5/5	30/15
Norovirus (MNV)*	1,5	15	30
Rotavirus*	1/1,5	10/15	60/5
Adenovirus*	2	20	60
Papovavirus / Polyomavirus / SV40*	1,5	15	15
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)			
EN 13727 (bakterizid)	0,25	2,5	5
EN 13624 (levurozid)	0,25	2,5	5
EN 14348 (mykobakterizid)	1,5	15	60
EN 14476 (Norovirus, MNV)	1/1,5	10/15	60/30
EN 14476 (begrenzt viruzid PLUS)	2/1**	20/10**	30/60**
EURO-Normen 4-Felder-Test (geringe und hohe Belastung)			
EN 16615 (bakterizid)	0,5/1	5/10	15/5
EN 16615 (levurozid)	0,5/1	5/10	15/5

* DVV 2015 (Susp. Test) ** geringe Belastung

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Pro Dosierbeutel	400 x 20 ml	30 765 60 PZN 108 328 71
Incidin™ Pro Dosierflasche	3 x 2 L	30 766 80 PZN 101 793 88
Incidin™ Pro Kanister	6 L	30 767 60 PZN 101 793 71
Incidin™ Pro Kanister	30 L	30 767 80

EUROPEAN HEADQUARTERS:
ECOLAB EUROPE GMBH

Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41 (0) 44-877-2001

www.ecolab.eu



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900

www.ecolabhealthcare.de

FLÄCHENDESINFEKTION

ANWENDUNGSBEREICH



Oberflächendesinfektion
für Medizinprodukte



Flüssiges Desinfektionsmittel-
konzentrat zur Desinfektion
von Flächen aller Art.

ⓓ BIOZID N-54665

GEBRAUCHSANWEISUNG

Gebrauchslösung durch Verdünnen mit Wasser von Trinkwasserqualität (max. 30 °C) in der gewünschten Konzentration ansetzen.

Zu behandelnde Fläche feucht abwischen. Dabei auf gleichmäßige Benetzung achten.

Bei der Produktanwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Amin- bzw. aminderivathaltige Desinfektionsmittel und aldehydhaltige Desinfektionsmittel sind nicht im Wechsel anwendbar. Bei Umstellung ist eine gründliche Zwischenreinigung notwendig.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g ist als Wirkstoff enthalten:
10,0 g 2-Phenoxyethanol,
8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropyl)dodecylamin,
7,5 g Benzalkoniumchlorid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft – mikrobiologisch,
toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere
aktuellen Gutachten zur Verfügung.

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung
nicht über 25 °C lagern.

Kühl, trocken und vor direkter Sonnen-
einstrahlung geschützt lagern.

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE
VORSICHTIG VERWENDEN. VOR
GEBRAUCH STETS ETIKETT UND
PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN
GEBRAUCH.

CE 0297

ECOLAB®

www.ecolab.com